



Gebraiksaanwijzing
Verwarmde bandage
AB15, WB25, KB35, SB45,
RB66, NB66, NSB75, EB85

Hartelijk dank ...

dat u zich voor een koop van onze verwarmde bandage heeft gekozen.

Om van een langdurig plezier aan de verwarmde bandage te hebben, leest u a.u.b. eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door en houdt rekening met de verschillende aanwijzingen.

Belangrijke Zekerheidsaanduiding

A.u.b. volg de volgende zekerheidsaankwijzingen, omdat anders personen- of materiaalschade ontstaan kan en de garantie op grond van verkeerd gebruik kan komen te vervallen.

- Onze aanbeveling dat kinderen, zwangere, personen met pacemaker of met andere gezondheidelijke

- problemen voor het gebruik van de verwarmde bandage een arts om eventuele gezondheidsrisiko's te vragen.
- Als u bijwerkingen of andere onaangename bijwerkingen voelen, de bandage direct uitschakelen en direct een arts beraden, voordat de verwarmde bandage weer in gebruik wordt genomen.
- Gebruik de verwarmde bandage nooit, als deze nat mocht zijn.
- Gebruik de verwarmde bandage nooit voor een langere tijdruim of gedurende het slapen.
- Steek geen pennen of naalden in de verwarmde bandage, omdat dit tot beschadigingen in uw verwarmings-element of kabels kan leiden.
- Gebruik de verwarmde bandage niet op een gevoelige huidoppervlaktegebruik.
- Verkeerd gebruik kan tot verbrandingen leiden.
- Schakel de verwarmde bandage nooit in




als deze samengevouwen is.

- Verhinder elk mogelijk contact van het bedieningselement met vuur of andere hittebronnen.
- Verhinder elk mogelijk contact van het bedieningselement met vuur of andere hittebronnen.
- De akku is voor ca. 500 ladingen voorzien - Gebruik alleen het laadapparaat wat in de leveringsverpakking is toegevoegd.

In gebruik nemen

Aad de akku voor het eerste gebruik minstens 5 uur op. De akku is alleen tot kwaliteitscontrole in de fabriek voorgeladen. Alle verdere akku opladingen duren ca. 4 uur voor de akku geheel vol is.


Steek het laadapparaat in het stopcontact. Het laadapparaat is voor 110/230V voorzien.

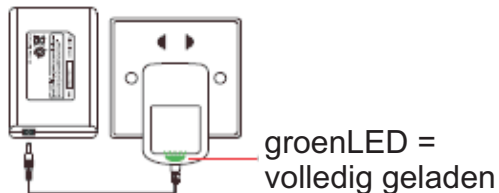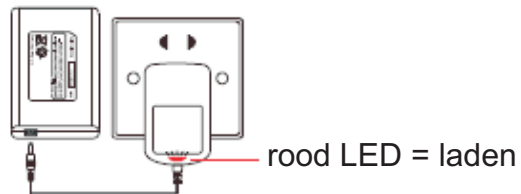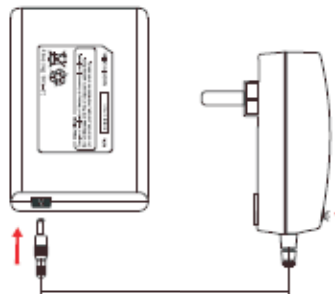

Akku/bedieningselement sluiten



Zoek de kabel in de kleine zak van de bandage.

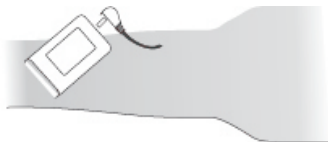


Sluit het bedieningselement aan.




Steek het bedieningselement in de kleine zak.

Aanschakelen en de temperatuur kiezen

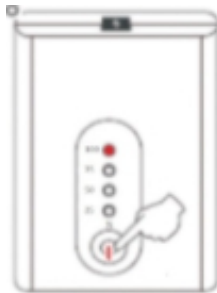


Hou de aan/uit knop 2 seconde ingedrukt tot de rood led oplicht.

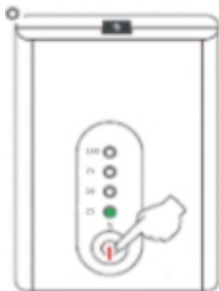


Door vaker op de aan/uit knop te drukken, kunt u de temperatuur instelling veranderen
groen = minste

Temperatuur kiezen

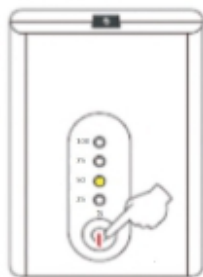


Door vaker op de aan/uit knop te drukken, kunt u de temperatuur instelling veranderen
geel = middel

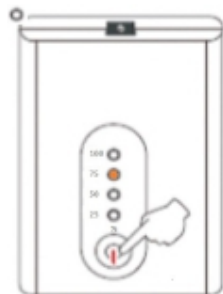

Door vaker op de aan/uit knop te drukken, kunt u de temperatuur instelling veranderen
oranje = hoog

Temperatuur kiezen / Uitschakelen

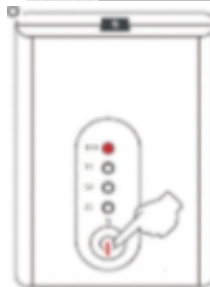

Door vaker op de aan/uit knop te drukken, kunt u de temperatuur instelling veranderen
rood = maximum



Om het bedieningselement uit te schakelen, hou de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt, tot de blauwe led oplicht..

Wassen en Verzorgen



- Verwijder voor het wassen het bedieningselement.
- Er wordt uitdrukkelijk alleen op de hand wassen aanbevolen.
- Gebruik een milde zeep of een fijn wasmiddel.
- Gebruik nooit een bleekmiddel van welke aard ook.
- Hang de verwarmbare bandage om te drogen op.
- Wring de verwarmbare bandage nooit uit en strijk deze nooit, hierdoor kunnen de warmte elementen beschadigen.

Service en Garantie

Probeer nooit uw verwarmbare bandage, het bedieningselement of het netdeel zelf te repareren. In dit geval vervalt alle aanspraak op garantie. Neem a.u.b. contact op met het mc heat® Service. De garantie tijd bedraagt 24 maanden berekent vanaf uw verkoopdatum. Als garantie bewijs wordt alleen een kassabon met datum of rekening als bewijs geaccepteerd. Hand geschreven kwitanties zijn als garantiebewijs niet geldig. De garantie sluit schade uit (uitsluitend en zonder uitzondering), schade door scherpe voorwerpen, buigen, samen drukken, vallen laten, water etc, die door wangebruik, misbruik, aansluitend gebruik niet volgens de gebruiksaanwijzingen.

Service en Garantie

Neem in ieder geval eerst contact op met mc heat®. Als u vragen of problemen heeft met ons verwarmde bandage. U bereikt ons per e-mail onder info@mc-heat.com. Wij zullen dan alles proberen met u het probleem op te lossen. Zou het nodig zijn de verwarmde bandage aan ons terug te moeten sturen, krijgt u van ons een RMA nr. Deze moet duidelijk zichtbaar op de terugzendkarton worden vermeld. Er kunnen geen RMA terugzendingen zonder dit nummer worden aangenomen.

Groene zone/ Recycling

Deze verwarmde bandage mag na zijn levensduur niet bij het normale huisvuil gezet worden. Recycle deze matrasovertrek bij een electro container. Verwijder u het bij een desbetreffende schrotthandelaar. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente/stad werken.

Batterijen horen niet bij het huisvuil. Verbruikers zijn wettelijk verplicht gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw batterijen overal waar batterijen verkocht worden terugbrengen zowel als bij elke bouwmarkt waar batterijen verkocht worden. Natuurlijk kunt u de in deze levering bijgevoegde accu na gebruik kosteloos aan ons terugsturen.

Groene zone/ Recycling

Batterijen met schaadstoffen zijn met gekenmerkt met deze tekens:

Pb=Batterij met lood

Cd= batterij met cadmium

Hg= batterij met quickzilver



Technische gegevens

Technische gegevens laaddeel:

Ingang:100/240V AC 50/60Hz 0,25 A

Uitgang:8,4V DC 0,7 A




Technische gegevens bandage:

Ingang: 7,4 V Lithium Ionen Akku


Bandage maaterial: 97% Neopreen

3% Polyamide


Rug-/Voetgelenk bandage

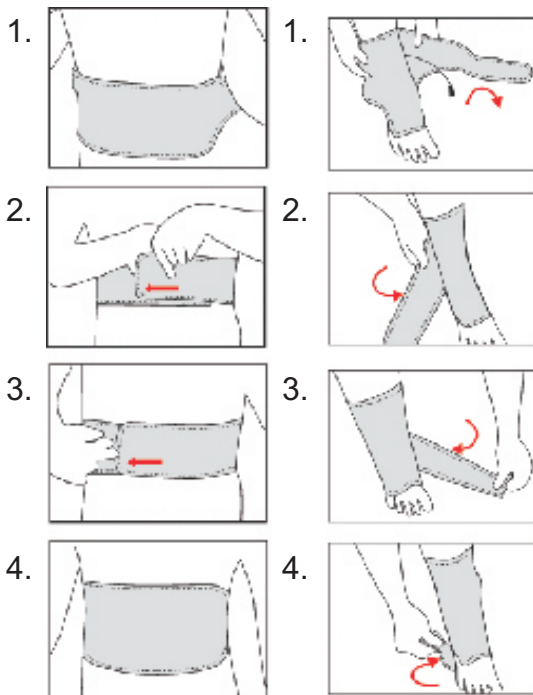


Ellebog/Schouder Bandage

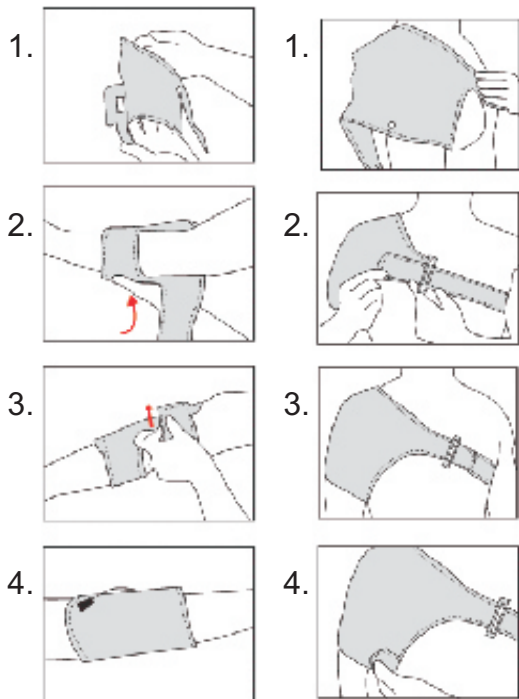

Nek/Nek-Schouder Bandage

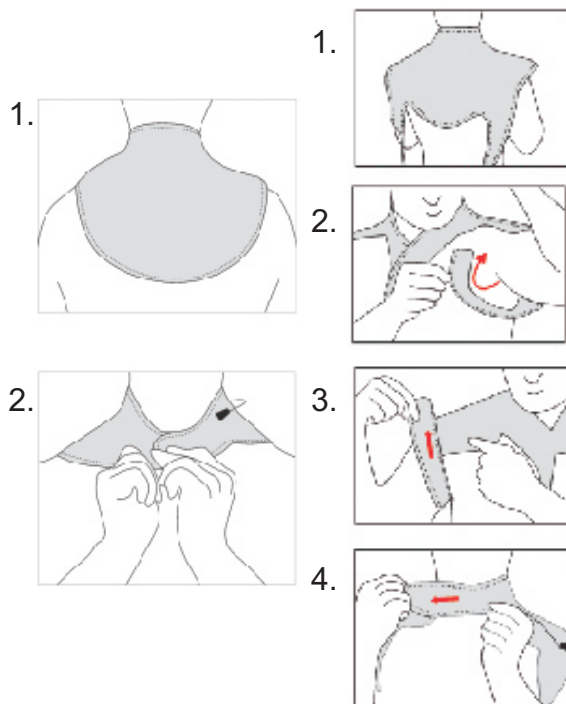

Pols-/Kniebandage

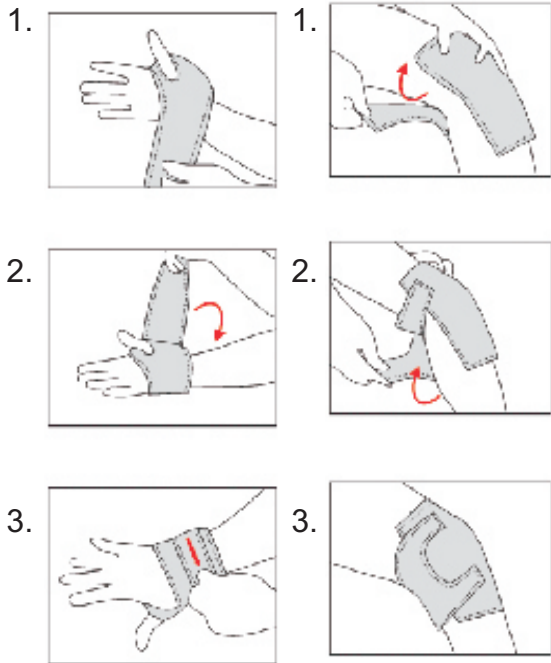

Kontaktadres

MM-Store GmbH
Gesandtenstrasse 6
D-93047 Regensburg
+49-(0)941-59937226
www.mc-heat.com
info@mc-heat.com

Verdere interessante verwarmde
produkten vind u in het Internet
www.mc-heat.com